

グッジョブフォトンストロング 25 の取り付け方

車椅子と 点滴スタンド編

グッジョブフォトンストロング 25 には、①～③の番号と、取り付け方向が書かれたシールが貼ってあります。

車椅子・歩行器側

スタンド側

過度な締めすぎに注意!

①のツマミを時計まわりに回し、しっかりと固定します。

②

③のツマミを反時計まわりに回し、緩めてから、点滴スタンドの位置を車椅子に干渉しない位置に置きます。

3

スタンド側

スタンド側のクランプを点滴スタンドへ取り付け、②のツマミを音が鳴るまで、しっかりと倒して固定します。

車椅子・歩行器側のクランプをグリップ等へ取り付け、クランプではさみます。

1

地面と水平に!

クランプと地面が水平になるように傾きを調整してください。

前側への取り付けイメージ

3へ

外すときは...

ボタンを押したまま、レバーを起してください。

パチン!
と音がしたら OK!

4

点滴スタンドの位置を決め、③のツマミを時計まわりに回して、位置を固定します。

エレベーターなどの狭い場所を通る場合の使い方

狭い場所などを通るときは、③のツマミを緩めると、点滴スタンドの位置を変えられます。