

# ヨッコイショテーブル

## 取扱説明書

### 仕様

【ヨッコイショ テーブル】

TAISコード 01272-000003

サイズ 幅:630mm×奥行:600mm

厚み:15mm

重量 2,500g

このたびは、ヨッコイショテーブルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

●正しくご使用いただくためにご使用の前に必ずお読みください。


### ⚠ 安全上のご注意

- ⚠ **テーブルの前部分を押さえないでください。**  
テーブルが破損したり、車いすごと転倒する恐れがあります。
- ⚠ **水に濡らさないようにしてください。**  
濡れた場合は速やかに拭き取ってください。
- ⚠ **テーブルが適切にセットされているかご確認ください。**  
不安定な状態ではないか安全をご確認ください。  
車いすとテーブルの間でのずれ落ち、挟み込みには十分にご注意ください。
- ⚠ **お取り扱いには医師、看護師、PT、OTなど専門家に適切な指示をうけて装着してください**



### 取り付け可能寸法

- ① 左右の肘パッド幅(外～外) 450mm～540mm  
肘パッドの厚み 30mm / 25mm / 15mm  
左右の背パイプ幅(外～外) 400mm～430mm
- ② 肘パッドのない車いすにはマジックベルトでの固定が可能です。
- ③ 車いすの座幅 40cm～42cmが目安ですが①の実寸を計測ください。

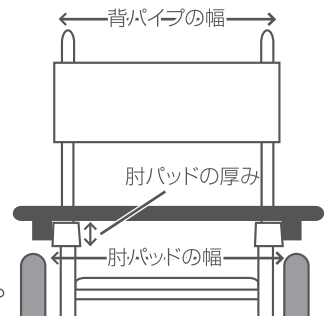






※取り付け時には、アームパッドがしっかり固定されていることを確認下さい。なお、本製品及びアームパッドのネジのゆるみは定期的にご点検下さい。

### 取り付け方法

※ネジの締め過ぎにご注意下さい  
※定期的にネジのゆるみをご確認下さい

a. 肘パッドの厚みを確認し、厚みによって調整部品を下記の様に調整ください。

- 26～30mmの場合 ネジをゆるめてパッドの厚みに調整して下さい。
- 25mmの場合 図②の様に固定します。(出荷時はこの状態)
- 15mmの場合 平型スペーサーを図②の位置から図③の位置に入れ替えます。

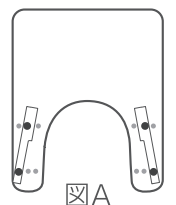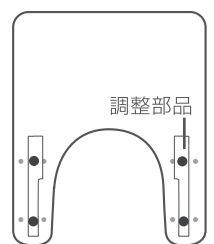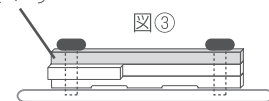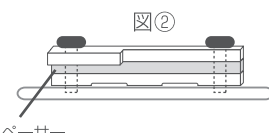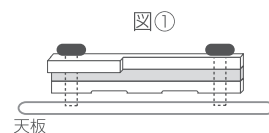


b. テーブルを肘パッドの上に置き、黒い固定ねじを4カ所ゆるめ、調整部品がそれぞれ肘パッドの外側に沿う位置のねじ穴に固定します。これでテーブルの横の動きを固定します。

※調整部品は図Aのようにも配置できます。

c. ご利用者様が座った状態で、前方からテーブルを差し込みます。テーブルの後端が背パイプより後方へいく程度に設置します。

※身体とテーブルとの間が窮屈でないか、テーブルが浅く設置されて不安定でないかをご確認ください。

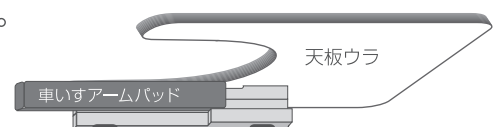


<販売元> 株式会社 ニシウラ

〒680-1243 鳥取県鳥取市河原町佐貫1093-8 TEL.0858-85-0601 FAX.0858-85-2227 E-Mail:nobu\_nis@nishiura.jp

# ヨッコイショ テーブル 取り付け寸法表


ヨッコイショ テーブル取り付けにあたっての、調整部品の各設置サイズです。

## 【スタンダードタイプ】

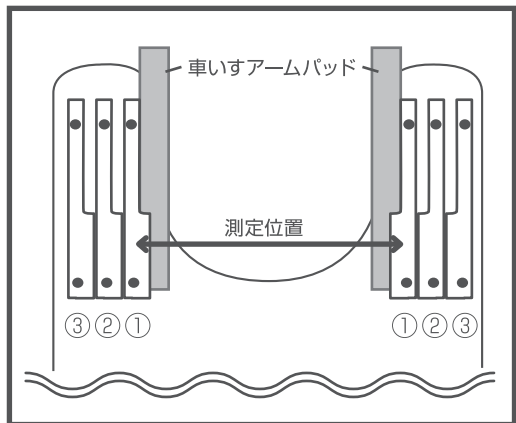

- ①～① 450mm      ①～② 480mm
- ②～② 505mm      ②～③ 525mm
- ③～③ 540mm

## 【片側サポートタイプ/リバーシブルタイプ】

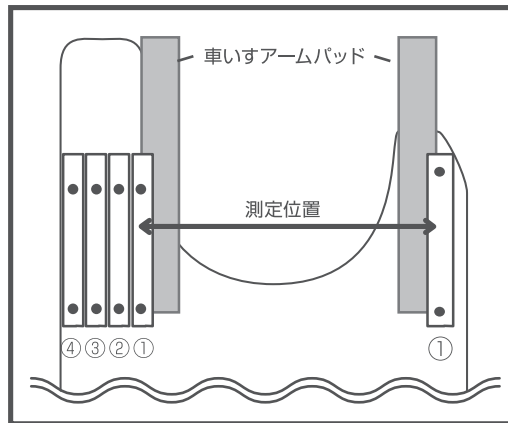

- ①～① 450mm      ①～③ 500mm
- ①～② 475mm      ①～④ 520mm

※計測値は車いすのアームパッドの外側が接する部分での数値です。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

# ヨッコイショテーブル 保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、通常の使用において万一故障が発生しました場合は下記の規定により修理保証させていただきます。

- ① 保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- ② 保証期間中に品質の不完全による故障が生じた場合には、無料にて修理致します。
- ③ ただし、以下の場合は保証期間中でも保証書は適用されません。
  - a. 説明書の内容以外の操作や取扱上の不注意
  - b. 製品に改造を加えた場合の故障
  - c. 天災・地変等による故障、損傷
  - d. 本体ではなく消耗部品
  - e. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
  - f. 保証書に販売店名、購入日等所定の記載が無い場合
  - g. 保存上の不備
- ④ 以上の保証は本製品を日本国内で使用した場合に限ります。

ヨッコイショテーブル 本体保証書			
型番	<input type="checkbox"/> スタンダードタイプ	<input type="checkbox"/> 片側サポートタイプ	<input type="checkbox"/> リバーシブルタイプ
保証期間	ご購入日より1年間		
お客様ご記入欄			
お名前	電話番号	-	-
ご住所 〒	-		
販売店記入欄			
店名	電話番号	-	-
住所			
		ご購入日	年 月 日

お願い 本保証書は、所定事項が記入されていることにより有効となります。記入の無い場合は、ご購入日、販売店名を証明できるもの(納品書や領収書)を添付してください。

販売店様へ お客様へ商品をお渡しする際は、必ず販売日・貴店名・住所をご記入の上、貴店印をご捺印下さい。記入漏れがあると、保証期間内でも無料保証が受けられない事があります。

株式会社ニシウラ

〒680-1243 鳥取県鳥取市河原町佐貫1093-8  
TEL.0858-85-0601 FAX.0858-85-2227